

## Gebruiksaanwijzing



Voetverzorgingsapparaat

Veloria 2

# Inhoudsopgave

---

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b>	<b>4</b>
<b>Reiniging en desinfectie</b>	<b>9</b>
<b>Leer het apparaat kennen</b>	<b>10</b>
<b>Voor gebruik</b>	<b>11</b>
Toepassingsgebied	11
Ingebruikname	11
<b>Gebruik</b>	<b>13</b>
Bedieningsstappen	13
Houding tijdens verwerking	14
Zuig	16
De filterzak vervangen	16
Grof stoffilter vervangen	17
Het gereedschap opspannen	17
Snelheid instellen	17
Geheugentoetsen m1 en m2	18
Voetschakelaar	18
<b>Onderhoud en verzorging</b>	<b>19</b>
Spantanghouder reinigen	19
Overzicht onderhoud	20
<b>Hanteringsinstructies</b>	<b>21</b>
<b>Problemen oplossen</b>	<b>22</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>23</b>

# Voorwoord

---

Met het Veloria 2 voetverzorgingsapparaat heeft u een product gekocht dat de laatste stand van de techniek vertegenwoordigt en volgens strenge kwaliteitscriteria is vervaardigd. Omdat wij onze producten voortdurend verder ontwikkelen, is het mogelijk dat de afbeeldingen en tekeningen in dit document enigszins afwijken van het door u gekochte product.

Deze gebruikershandleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en legt uit hoe u de Veloria 2 gebruikt. Als u nog vragen of suggesties hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail.

Deze handleiding maakt deel uit van de Veloria 2 en moet binnen handbereik worden bewaard. Als u dit product doorgeeft aan derden, geef dan ook dit document mee, omdat het belangrijke informatie bevat over de ingebruikname en de omgang met het product.

## *Korte beschrijving van de functies*

De Veloria 2 is een voetverzorgingsapparaat voor het bewerken van eelt en nagels. Het handstuk kan roterende instrumenten bevatten zoals diamantslijpmachines, staalsnijders of keramische snijders. Afhankelijk van het apparaat worden deze ingesteld op een rotatie van maximaal 40.000 tpm, waardoor efficiënt weefsel kan worden verwijderd. De draairichting kan met één druk op de knop worden gewijzigd. De geïntegreerde afzuigenheid met filter vangt het stof dat vrijkomt op betrouwbare wijze op. De rotatiesnelheid en zuigkracht worden ingesteld met het folietoetsenbord.

## Veiligheidsinstructies

---



De installatie van de werkplek moet voldoen aan de relevante voorschriften. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt en de afvoerlucht gemakkelijk kan ontsnappen.



Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet met een aardleiding. Door de stekker uit het stopcontact te trekken, wordt het apparaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld. Plaats het apparaat daarom zo dat de stekker altijd goed bereikbaar is. Ook de hoofdschakelaar moet altijd goed bereikbaar zijn.



Schakel de besturingseenheid alleen in als u het motorhandstuk stevig in uw hand houdt of als het in de handstukhouder zit.



Voorkom dat er vloeistof in de besturingseenheid komt. Dit kan de elektronische componenten vernielen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigt/desinfecteert.



Het apparaat kan alleen volledig van het lichtnet worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken. Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen en laat ze indien

## Veiligheidsinstructies

---

nodig vervangen door een gespecialiseerde werkplaats.



Zorg ervoor dat je haar niet verstrikt kan raken in de draaiende delen tijdens het werken met het apparaat. Draag indien nodig een haarnet.



Als er stof of dampen vrijkomen tijdens het verwerken van materialen, moet een afzuig- of sproei-inrichting worden gebruikt. Draag monden neusbescherming tijdens het verwerken. Bij het verwerken van technische werkstukken moeten beschermende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het materiaal.



Om veiligheidsredenen moeten tijdens de behandeling ondoordringbare wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Daarnaast moet een gezichtsmasker (ademhalingstoestel) conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.



Zorg er bij het werken voor dat het motorhandstuk en de voet van de klant (of het werkstuk) een stevige grip hebben. Werk alleen met lichte druk en uiterste voorzichtigheid aan de voet van de klant om letsel te voorkomen.



Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die vertrouwd zijn met de werking en

## Veiligheidsinstructies

---

bediening van het apparaat. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



Werk niet met gereedschap om ervoor te zorgen dat het gereedschap stevig in de spantang wordt vastgehouden,

- die een vette gereedschapschacht hebben,
- waarvan de schacht versleten is,
- waarvan de schacht van het gereedschap gebogen is.



Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat

- het gereedschap ver genoeg in de spantang kan worden geduwd (controleer zo nodig met een testpen en maak schoon),
- het gereedschap niet kantelt tijdens het spannen,
- het gereedschap stevig in de spantang zit,
- het gereedschap is goedgekeurd voor de maximumsnelheid van het apparaat

## Veiligheidsinstructies

---

(informatie van de fabrikant van het gereedschap),

- het gereedschap absoluut droog is.



Tijdens de filtervervanging moet een ademhalingsbeschermingsmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.



Om veiligheidsredenen mag het gereedschap alleen worden verwisseld als het handstuk is uitgeschakeld.



Schakel het apparaat onmiddellijk uit als

- het gereedschap moet tijdens het bewerken loskomen uit de spantang.
- de motor wordt geblokkeerd tijdens de bewerking.



In het toepassingsgebied voor voetverzorging mogen de apparaten alleen worden gebruikt met ingeschakelde afzuiging.



Gebruik het afzuigstelsel alleen als er een filter is gemonteerd. Controleer het filter elke 10 bedrijfsuren. Vervang een vol filter onmiddellijk, maar uiterlijk na 50 bedrijfsuren.



Gebruik de afzuigunit nooit om vloeistoffen of lucht met een hoog vloeistofgehalte (bijv. waternevel) aan te zuigen.



Behandel het apparaat alleen volgens de gebruiksaanwijzing. Voer zelf geen reparatie-, ombouw- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uit. Laat deze werkzaamheden alleen door een vakman uitvoeren. Op verzoek ontvangen werkplaatsen de benodigde documentatie voor reparatiewerkzaamheden. De behuizing mag nooit worden geopend als de besturingseenheid is aangesloten op het elektriciteitsnet, omdat sommige onderdelen van het apparaat onder spanning staan. Dit apparaat mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant. Wij aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de besturingseenheid.



Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld vanuit de stand-bymodus, start het met de laatst ingestelde waarden voor de snelheid en het zuigniveau. Zorg ervoor dat de frees die je vervangt niet op een te hoge snelheid wordt gestart. Stel de gewenste snelheid in voordat u de frees vervangt.



## Reiniging en desinfectie

---




Het apparaat is bedoeld voor gebruik met roterende instrumenten die niet in de huid of slijmvliezen dringen wanneer ze worden gebruikt zoals de bedoeling is, maar die toch onbedoeld letsel kunnen veroorzaken. De volgende reinigings- en desinfectieprocedures zijn ook voor dit doel ontworpen. De volgende stappen moeten na elke behandeling worden uitgevoerd:

- Verwijder eerst het roterende instrument (frees). Dit moet worden voorbereid volgens de instructies van de fabrikant.
- Verwijder weefselresten van het apparaat door af te nemen met een papieren doekje dat licht bevochtigd is met kraanwater. Veeg vervolgens alle oppervlakken van het apparaat af met desinfecterende doekjes (Mikrozid AF-doekjes van Schülke en Mayr). Het apparaat kan tijdens de levensduur zo vaak als nodig gereinigd en gedesinfecteerd worden.

## Leer het apparaat kennen

---

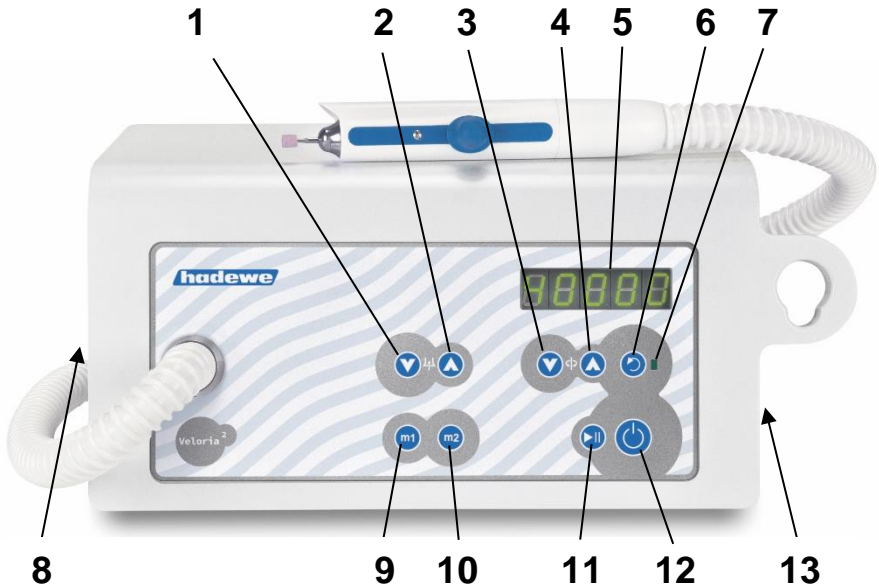

- 1 Verminder de zuigkracht
- 2 Afzuigcapaciteit verhogen
- 3 Snelheid verlagen
- 4 Snelheid verhogen
- 5 Weergave van snelheid/afzuigniveau
- 6 Draairichting wijzigen
- 7 Indicator licht op bij linksom draaien
- 8 Hoofdschakelaar
- 9 Geheugentoets m1 voor snelheid/zuigkracht
- 10 Geheugenknop m2 voor snelheid/zuigkracht
- 11 Start/Stop-Knop
- 12 Het apparaat in-/uitschakelen (stand-by)
- 13 Aansluitbus voor voetschakelaar

# Voor gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Besteed vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.


## Toepassingsgebied

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die een opleiding tot podoloog hebben afgerond. Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet de gebruiker zich vertrouwd maken met het apparaat aan de hand van deze instructies of moet hij geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan.

Het apparaat mag alleen in gesloten ruimten worden gebruikt. Het kan worden gebruikt in een commerciële of huishoudelijke omgeving.

Het apparaat kan worden gebruikt voor installatie in kasten of als draagbaar apparaat voor koffers. Het is geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Voetverzorging (slijpen, frezen en polijsten),
- Manicure (slijpen, frezen en polijsten).

 Het apparaat is bedoeld voor gebruik met roterende instrumenten die de huid of slijmvliezen niet binnendringen als ze worden gebruikt zoals de bedoeling is, maar die toch letsel kunnen veroorzaken als ze onbedoeld worden gebruikt.




Let op: Er moet worden afgezoegen in het pedicuregebied.

## Inbedrijfstelling


De installatie van de werkplek moet voldoen aan de relevante voorschriften. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatiesleuven niet afgedekt zijn en de afvoerlucht gemakkelijk kan ontsnappen. Om ervoor te zorgen dat de afvoerlucht ongehinderd kan ontsnappen, moet er een ruimte van 12 cm achter het apparaat zijn.

Plaats het apparaat zo dat de bedieningselementen goed bereikbaar zijn en het uitlooppunt van de slang niet meer dan 60 cm van de voet van de klant verwijderd is. De positioneringshoogte is 30 - 90 cm boven de vloer.

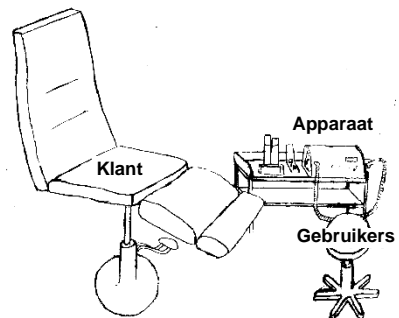


Afbeelding: Voorbeeld van het plaatsen van het voetverzorgingsapparaat in de behandelkamer

# Voor gebruik

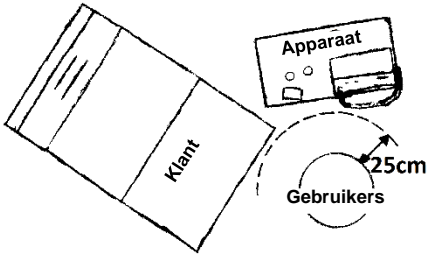

Afbeelding: Workplace vanuit vogelperspectief

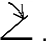Als u een voetschakelaar hebt, steekt u de stekker van de voetschakelaar in de aansluiting (13) aan de rechterkant van het apparaat met het symbool .

Controleer of de filterzak en het grofstofilter geplaatst zijn. Controleer of het gereedschap is vastgeklemd.

De hoofdschakelaar bevindt zich linksachter op het apparaat. Druk hierop om het apparaat in te schakelen.



Houd het handstuk in de hand. Als de slang het handstuk verdraait, kan

dit worden aangepast op de bedieningseenheid.



Druk op de knop (11) aan de voorkant van het apparaat om het handstuk en de afzuiging te starten.

## Operationele stappen

De volgorde van de stappen wordt hieronder beschreven. De afzonderlijke stappen worden vervolgens in detail beschreven. Lees de volledige instructies voordat je aan de slag gaat.

Nadat je het instrument hebt vastgeklemd, druk je op de stand-byknop (12) om het apparaat in te schakelen. Gebruik de knoppen (3) en (4) om de gewenste snelheid te selecteren. De fabrikanten van de instrumenten geven vaak aanbevelingen voor de optimale snelheid. Zorg er echter in ieder geval voor dat de maximaal toegestane snelheid niet wordt overschreden. Druk nu op de start/stop-knop (11) om het instrument te laten draaien.

Je kunt nu de knop (6) gebruiken om de draairichting te selecteren. Normaal gesproken werk je met de wijzers van de klok mee. De meeste freesinstrumenten (stalen instrumenten met een stalen snijkant) zijn ook geoptimaliseerd voor rechtsom draaien. Bij diamantslijpmachines of slijpmachines met aluminiumoxide heeft de draairichting geen invloed op de afnamesnelheid. Tegen de wijzers van de klok in werken kan nuttig zijn als het ontstane freesstof in het gezichtsveld dwarrelt als het met de wijzers van de klok meedraait.

Schakel nu ook de zuigkracht in door op knop (2) te drukken. Met de knoppen (1) en (2) kun je de zuigkracht instellen.

Zodra de snelheid en de zuigkracht zijn ingesteld, kun je beginnen met werken. Als je het werk wilt onderbreken, druk dan op de Start/Stopknop (11). De motor van het handstuk en de afzuiging worden dan uitgeschakeld. Je kunt nu het handstuk in de handstukhouder aan de rechterkant van het apparaat plaatsen. Als je helemaal wilt stoppen met werken, gebruik dan de stand-by toets (12). Het display zal dan ook uitschakelen. Je kunt het apparaat ook op stand-by zetten door op de voetschakelaar te drukken.

We raden aan het apparaat uit te schakelen met de hoofdschakelaar als het langere tijd niet wordt gebruikt. Dit bespaart elektriciteit. Ook moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken als het apparaat niet wordt gebruikt.

# Gebruik

## Houding tijdens verwerking

De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van houdingen bij het werken aan verschillende delen van de voet. Zorg er altijd voor dat de voet goed vastzit en dat je zonder spanning kunt werken.



# Gebruik

---



# Gebruik

## Zuig

Schakel de afzuiging in met de knop (2). De afzuigkracht kan in 5 stappen worden geregeld. Het geselecteerde afzuigniveau verschijnt op het display. Op niveau nul is de afzuiging uitgeschakeld.

Als de zuigmotor oververhit raakt, schakelt hij automatisch uit. Laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat het apparaat nakijken als de storing zich herhaaldelijk voordoet.

## De filterzak vervangen




Tijdens de filtervervanging moet een ademmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.

Gebruik het afzuigstelsel alleen als er een filter is gemonteerd. Controleer het filter elke 10 bedrijfsuren. Vervang een vol filter onmiddellijk, maar niet later dan wanneer **FC** op het display verschijnt. Deze melding verschijnt na 50 bedrijfsuren in de afzuigmodus.

Druk de opening van het stoffilter (Art. 5179) lichtjes in met je vinger.



Open het deksel van de stofkamer en verwijder het oude filter. Houd het filter in het midden vast om het erop te schuiven, zoals op de afbeelding, om te voorkomen dat het knikt.

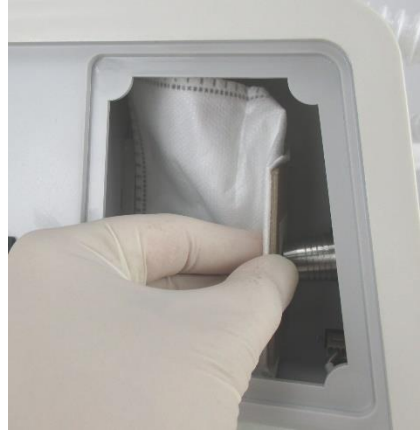

Het stoffilter (Art. 5179) moet worden gebruikt. Het papierfilter (Art. 5115) mag **NIET** worden gebruikt.

Nadat het filter is vervangen, moet de inschakelduur op nul worden gezet. Zet hiervoor het apparaat op stand-by met toets (12). Houd nu de toetsen (1) en (2) ingedrukt tot **FC** op het display verschijnt.




# Gebruik

---

## Het grofstoffilter vervangen

Het grofstoffilter (Art. 3752) moet om de 200 bedrijfsuren worden vervangen. Het oude filter wordt verwijderd en het nieuwe wordt in de houder geschoven.

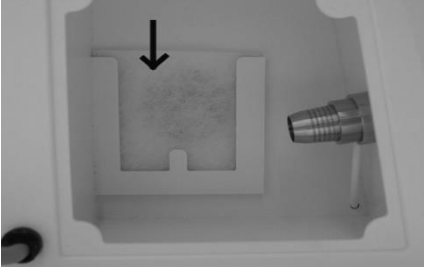

## Het gereedschap opspannen

Het handstuk is uitgerust met een spantang voor gereedschappen die veel gebruikt worden bij pedicure (diameter 2,35 mm). Om de spantang te openen, duw je de klemknop naar voren met je duim en laat je hem in deze positie staan.



Steek nu het gereedschap zo ver mogelijk naar binnen. Trek de knop terug en het gereedschap zit vastgeklemd.



Vervang het gereedschap alleen als het handstuk is uitgeschakeld.

## Snelheid instellen

Neem het handstuk (met gereedschap) in de hand of plaats het in de handstukhouder. Schakel nu het apparaat in met de knop (12). Je kunt nu de gewenste snelheid instellen met de knoppen (3) en (4) en de draairichting kiezen (knop 6).

# Gebruik

---

## Geheugentoetsen m1 en m2


Veelgebruikte snelheden/zuigvermogens kunnen worden opgeslagen. Hiervoor zijn 2 geheugenlocaties beschikbaar. Stel eerst de gewenste snelheid/zuigkracht in. Sla dit op door de knop m1 4 seconden ingedrukt te houden. Druk kort op de knop m1 om de opgeslagen snelheid/afzuigcapaciteit snel op te roepen. Met de knop m2 kunnen extra waarden worden opgeslagen.



Werk alleen met gereedschap dat is toegestaan voor de snelheden die zijn opgeslagen onder m1 en m2!

## Voet schakelaar

### Voetschakelaar in gebruik nemen

Gebruik alleen originele hadewe voetschakelaars (art. 0970) om schade te voorkomen. Steek de stekker van de voetschakelaar in de aansluiting (13) aan de rechterkant van het apparaat met het symbool .

### Functie van de voetschakelaar

Houd de voetschakelaar ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten. Druk vervolgens kort om het handstuk en de zuigmotor te starten/stoppen.

# Onderhoud en verzorging

## Spantanghouder reinigen

Vuil dringt meestal maar voor een klein deel het handstuk binnen. Vuil kan zich echter na verloop van tijd ophopen en de werking van het apparaat beïnvloeden. Maak de spantang daarom elke maand schoon.

### *Spantanghouder verwijderen*


Schroef de punt van het handstuk los met behulp van de steeksleutel:



Reinig nu het handstuk en de tip met de reinigingsborstel. Schuif de klemknop naar voren:



Plaats de ronde assleutel op de as en houd deze stevig vast. Gebruik de puntige kant van de sleutel om de spantang los te draaien:

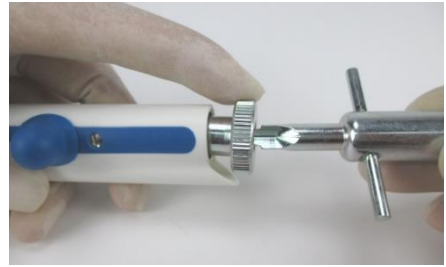

De spantanghouder wordt in omgekeerde volgorde gemonteerd. Zorg ervoor dat de spantanghouder open is tijdens de montage (druk de knop naar voren) en dat de spantanghouder goed vastzit.

### *De spantanghouder reinigen*

Week de spantanghouder in spiritus of een vloeistof voor het reinigen van instrumenten. Reinig de sleuven van de spantanghouder met de reinigingsborstel:



Gebruik de reinigingsborstel om alle vuilresten uit het gat te drukken:



Spoel de spantang goed af. Laat de spantang vervolgens drogen. Doe

## Onderhoud en verzorging

---

een klein druppeltje olie op je wijsvinger en wrijf het in met je duim en wijsvinger. Dep nu de olie weg zodat er nog maar een heel licht laagje olie op je vingers zit. Draai nu de spantang tussen je duim en wijsvinger. Er mag nog maar een heel dun laagje olie op de spantang zitten. De regel is: Beter te weinig dan te veel.

### Overzicht onderhoud

<b>Wat?</b>	<b>Hoe vaak? Door wie?</b>
Spantanghouder schoon	maandelijks door gebruikers
Filterzak veranderen	elke 50 uur (controle elke 10 uur) door gebruiker
Het grofstoffilter vervangen	elke 200 uur door gebruiker
Onderhoud door een gespecialiseerde werkplaats (slijtageonderdelen vervangen, behuizing controleren, schoonmaken, lekstroom)	elke 250 bedrijfsuren, uiterlijk na één jaar

# Hanteringsinstructies

---



Plaats het gemotoriseerde handstuk nooit in een vloeistof en smeer het niet in met olie. Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen en desinfecteren geen vocht in het gemotoriseerde handstuk kan binnendringen. Gebruik geen desinfectiespray.



Klem nooit natte frezen vast. Hierdoor komt er vocht in het handstuk, wat tot schade kan leiden.



De door hadewe gebruikte materialen sluiten roestvorming uit. In gevallen waarin roest wordt aangetroffen in het handstuk, tonen tests herhaaldelijk aan dat dit te wijten is aan vreemde roest afkomstig van gereedschap. Roest kan zelfs ontstaan op roestvrijstalen instrumenten van gerenommeerde fabrikanten, bijvoorbeeld door een onjuiste behandeling met chemische reinigings- en desinfectiemiddelen. Roest van buitenaf nestelt zich in het handstuk in de vorm van vliegroeit en leidt tot roestpitting. Laat daarom geen gereedschap in het handstuk geklemd zitten als je er niet mee werkt.



Laat het handstuk niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan de kogellagers en de motor beschadigen. Werk alleen met gereedschap dat in perfecte staat verkeert. Werk niet met gereedschap,

- die gebogen zijn,
- die een onbalans hebben,
- waarvan de as versleten is of

- die verroest zijn.



Werken met gereedschap dat niet in perfecte staat is, veroorzaakt een verhoogde trilling van het motorhandstuk. Dit kan leiden tot beschadiging of vernieling van de lagers, het opspanapparaat en de motor.



Werken met een te hoge druk verhoogt de werkpressies niet, omdat de motor wordt afgeremd. Een ander nadeel is de hogere belasting van de motor en de lagers.



Als je het apparaat wilt opsturen, verwijder dan eerst de stofzak.



Zuig alleen schuurspanen of stof op, maar nooit grotere deeltjes zoals wattenresten. Deze kunnen vast komen te zitten in het handstuk en leiden tot een verstopping.

# Problemen oplossen

---

## **Het handstuk trilt, maakt veel lawaai en/of wordt heet aan de voorkant.**

Gebruik van verbogen frees → Gebruik indien nodig een andere frees (De frees kan op verbogen worden gecontroleerd met freestestmeter 4990).

Maximaal toelaatbare snelheid van de frees is overschreden, met verhoogde trillingen als gevolg. → Neem de instructies van de fabrikant in acht.

## **Snijder is moeilijk in het handstuk te steken.**

Gebruik van verbogen frees → Gebruik indien nodig een andere frees (De frees kan op verbogen worden gecontroleerd met freestestmeter 4990).

Spantanghouder is vuil. → Reinig de spantanghouder volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

## **Frees klemt niet (draait).**

Spantanghouder is niet goed vastgedraaid. → Draai de spantanghouder vast volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

## **De knop van het handstuk is moeilijk te bedienen.**

Spantanghouder is vuil. → Reinig de spantanghouder volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Het rubber onder de knop is gekanteld. → Draai het rubber 90°.

## **Het apparaat heeft geen enkele functie.**

Controleer of de hoofdschakelaar aan de linkerkant is ingeschakeld.

Voetschakelaar wordt constant bediend of is defect → Trek bij wijze van test de stekker van de voetschakelaar uit het stopcontact van het apparaat.

Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat te resetten.

## **Het apparaat is luidruchtig op verschillende plaatsen.**

Het volume van het apparaat varieert afhankelijk van de ondergrond. Als het apparaat recht voor muren staat, wordt het geluid sterker weerkaatst dan wanneer het verder van muren staat.

## **De motor van het handstuk stottert kort (ongeveer 1 seconde) bij het inschakelen.**

Dit effect kan zich in zeldzame gevallen voordoen. Het effect is niet schadelijk voor het apparaat.

## **De afzuiging werkt niet.**

Als de zuigmotor oververhit raakt, schakelt hij automatisch uit. Laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat het apparaat nakijken als de storing zich herhaaldelijk voordoet.

## **Melding "FC" op het display**

Filter vervangen (Filter vervangen)  
→ Pagina 16

## **Foutmelding "E1" op het display**

De snelheid van de handstukmotor wijkt te veel af van de ingestelde waarde.

## **Foutmelding "E2" in de display**

Het toerental van de zuigmotor wijkt te veel af van de ingestelde waarde.

## **Foutmelding "E3" in de display**

De stroom van de handstukmotor was lange tijd te hoog.

# Technische gegevens

---

## 0985 Veloria 2

Gewicht: 2,7 kg  
Afmetingen: B273xH142xD186 mm  
Ingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz  
Stroomverbruik: 1A (100V) - 0,5A (240V)  
Primaire zekering: F1, F2: 4A trage doorslag  
Zekering Sec: Thermische zekering  
Bescherminingsklasse I  
Nauwkeurigheid snelheidsweergave: ±10%  
Handstuk:  
Toepassingsgedeelte: Type B  
Diameter: 19 - 25 mm  
Lengte: 144 mm  
Snelheid: 6.000 - 40.000 tpm  
Trillingen: <2,5 m/s<sup>2</sup>

## Omgevingsomstandigheden

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge, gesloten ruimtes.

### Bediening:

Temperatuur: +10°C tot +26°C  
Relatieve vochtigheid: 25% tot 75% (niet ingekort)  
Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

### Opslag:

Temp: -5°C tot +55°C  
Relatieve vochtigheid: 10% tot 95% (niet ingekort)  
Luchtdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

### Transport (tot 4 weken):

Temp: -5°C tot +55°C  
Relatieve vochtigheid: 10% tot 95% (niet ingekort)  
Luchtdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

## Bedrijfstijd

Het apparaat is ontworpen voor continu gebruik.

## Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product Voetverzorgingsapparaat 0985 voldoet aan de volgende richtlijnen:

2014/30/EU EMC-richtlijn  
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

hadewe GmbH - Grambartstraße 10  
30165 Hannover

## Accessoires en reserveonderdelen

Artikelnr.

5179	Fijnstoffilter
3752	Grof stoffilter
0970	Voetschakelaar
6158	Schoonmaakborstel



Het stoffilter (Art. 5179) moet worden gebruikt. Het papierfilter (Art. 5115) mag NIET worden gebruikt.

Het klemsysteem is ontworpen voor roterende instrumenten met een asdiameter van 2,35 mm in overeenstemming met DIN EN ISO 1797-1.

## Veiligheidsgerelateerd Examen

Het apparaat moet jaarlijks worden onderworpen aan een veiligheidskeuring volgens DGUV voorschrift 3 (voorheen BGV A3).

## Afvalverwijdering



Het apparaat en het filter kunnen besmettelijk materiaal bevatten, zoals schuurstofresten of weefselresten. Daarom moeten de hieronder beschreven instructies voor verwijdering dringend in acht worden genomen.

### *Verwijdering van apparaten*

In overeenstemming met de wet op elektrische en elektronische apparatuur moeten oude apparaten die in Duitsland zijn gekocht rechtstreeks naar de fabrikant (hadewe) worden gestuurd.

De verwijdering door hadewe is gratis. De apparaten mogen niet worden ingeleverd bij de openbare afvalverwijderingsinstanties (WEEE-Reg.-No.- DE20392713, b2b-apparaat). Neem voor hadewe-apparaten die in het buitenland zijn gekocht contact op met de importeur.

### *Opmerking voor verwerkingsinstallaties voor de verwijdering van apparaten*

Bij het demonteren van het apparaat moeten beschermende handschoenen van klasse 2 conform DIN EN 374-2 worden gedragen. Daarnaast moet een ademhalingsmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.

*Gooi de filterzak en het grofstoffilter weg*




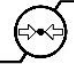





De filterzak en het grofstoffilter zijn laagverontreinigd afval. Deze moeten worden verzameld in ondoorzichtige, vloeistofdichte, bestendige plastic zakken en mogen niet worden vergruisd en bij het huishoudelijk afval worden gedaan.



# Technische gegevens

---

## Symbol

	Let op! Gevaar!		Productiedatum, naam en adres van de fabrikant
	Belangrijke opmerking!		Start/stop-knop
	Gebruiksaanwijzing Let op!	<b>m1, m2</b>	Snelheid/zuigkracht Bel of sla op
	Temperatuurbegrenzing (verwijzing naar een boven- ste en onderste tempera- tuurgrens)		Product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
	Luchtdruk: toegestaan Bereik		
	Vochtigheid: toegestaan bereik		
	Blijf droog!		
	Apparaat in-/uitschakelen (geen netvrijschakeling in stand-by)		
	Draairichting wijzigen		
	Zuig		
	Rotatie		
	Wisselstroom		
	Gelijkstroom		
	Smeltbare verbinding		
	Beschermende aarding		
	Voetschakelaar		





**hadewe**

hadewe GmbH  
Grambartstraße 10  
30165 Hannover  
Duitsland  
[info@hadewe.de](mailto:info@hadewe.de)  
[www.hadewe.de](http://www.hadewe.de)