

Gebruiksaanwijzing



Voetverzorgingsapparaat

Veloria 2 Chromo

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Veiligheidsinstructies	4
Reiniging en desinfectie	9
Leer het apparaat kennen	10
Voor gebruik	11
Toepassingsgebied	11
Ingebruikname	11
Gebruik	13
Bedieningsstappen	13
Houding tijdens verwerking	14
Zuig	16
De filterzak vervangen	16
Grof stoffilter vervangen	17
Het gereedschap opspannen	17
Snelheid instellen	17
Geheugentoetsen m1 en m2	18
Voetschakelaar	18
Onderhoud en verzorging	18
Het klemsysteem reinigen	19
Overzicht onderhoud	20
Hanteringsinstructies	21
Problemen oplossen	22
Technische gegevens	23

Voorwoord

Met de *Veloria 2 Chroom* voetverzorgingsmachine heeft u een product gekocht dat de laatste stand van de techniek vertegenwoordigt en is vervaardigd volgens strenge kwaliteitscriteria. Omdat we onze producten voortdurend verder ontwikkelen, is het mogelijk dat de afbeeldingen en tekeningen in dit document enigszins afwijken van het product dat u heeft gekocht.

Deze gebruikershandleiding bevat een gedetailleerde beschrijving en legt uit hoe u de *Veloria 2 Chrome* gebruikt. Mocht u nog vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail.

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de *Veloria 2 Chrome*. Bewaar deze binnen handbereik. Als u dit product doorgeeft aan derden, geef dan ook dit document mee, omdat het belangrijke informatie bevat over de ingebruikname en het gebruik van het product.

Korte beschrijving van de functies

De *Veloria 2 Chrome* is een voetverzorgingsapparaat voor het bewerken van eelt en nagels. Het handstuk kan roterende instrumenten bevatten zoals diamantslijpmachines, staalsnijders of keramische snijders. Afhankelijk van het apparaat worden deze ingesteld op een rotatie van maximaal 40.000 tpm, waardoor efficiënt weefsel kan worden verwijderd. De draairichting kan met één druk op de knop worden gewijzigd. De geïntegreerde afzuigeenheid met filter vangt het stof dat vrijkomt op betrouwbare wijze op. De rotatiesnelheid en de zuigkracht worden ingesteld met het folietoetsenbord.

Veiligheidsinstructies



De installatie van de werkplek moet voldoen aan de relevante voorschriften. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt en de afvoerlucht gemakkelijk kan ontsnappen.



Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden aangesloten op een elektriciteitsnet met een aardleiding. Door de stekker uit het stopcontact te trekken, wordt het apparaat van het elektriciteitsnet losgekoppeld. Plaats het apparaat daarom zo dat de stekker altijd goed bereikbaar is. Ook de hoofdschakelaar moet altijd goed bereikbaar zijn.



Schakel de besturingseenheid alleen in als u het motorhandstuk stevig in uw hand houdt of als het in de handstukhouder zit.



Voorkom dat er vloeistof in de besturingseenheid komt. Dit kan de elektronische componenten vernielen. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigt/desinfecteert.



Het apparaat kan alleen volledig van het lichtnet worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken. Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen en laat ze indien

Veiligheidsinstructies

nodig vervangen door een gespecialiseerde werkplaats.



Zorg ervoor dat je haar niet verstrikt kan raken in de draaiende delen tijdens het werken met het apparaat. Draag indien nodig een haarnet.



Als er stof of dampen vrijkomen tijdens het verwerken van materialen, moet een afzuig- of sproei-inrichting worden gebruikt. Draag monden neusbescherming tijdens het verwerken. Bij het verwerken van technische werkstukken moeten beschermende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het materiaal.



Om veiligheidsredenen moeten tijdens de behandeling ondoordringbare wegwerphandschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Daarnaast moet een gezichtsmasker (ademhalingstoestel) conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.



Zorg er bij het werken voor dat het motorhandstuk en de voet van de klant (of het werkstuk) een stevige grip hebben. Werk alleen met lichte druk en uiterste voorzichtigheid aan de voet van de klant om letsel te voorkomen.

Veiligheidsinstructies



Werk niet met gereedschap om ervoor te zorgen dat het gereedschap stevig in de spantang wordt vastgehouden,

- die een vette gereedschapschacht hebben,
- waarvan de schacht versleten is,
- waarvan de schacht van het gereedschap gebogen is.



Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat

- het gereedschap ver genoeg in de spantang kan worden geduwd (controleer zo nodig met een testpen en maak schoon),
- het gereedschap niet kantelt tijdens het spannen,
- het gereedschap stevig in de spantang zit,
- het gereedschap is goedgekeurd voor de maximumsnelheid van het apparaat (informatie van de fabrikant van het gereedschap),
- het gereedschap absoluut droog is.



Tijdens de filtervervanging moet een ademhalingsmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.



Om veiligheidsredenen mag het gereedschap alleen worden verwisseld als het handstuk is uitgeschakeld.



Schakel het apparaat onmiddellijk uit als

- het gereedschap moet tijdens het bewerken

loskomen uit de spantang.

- de motor wordt geblokkeerd tijdens de bewerking.



In het toepassingsgebied voor voetverzorging mogen de apparaten alleen worden gebruikt met ingeschakelde afzuiging.



Gebruik het afzuigstelsel alleen als er een filter is gemonteerd. Controleer het filter elke 10 bedrijfsuren. Vervang een vol filter onmiddellijk, maar uiterlijk na 50 bedrijfsuren.



Gebruik de zuigeenheid nooit om vloeistoffen of lucht met een hoog vloeistofgehalte (bijv. waternevel) op te zuigen.



Behandel het apparaat alleen volgens de gebruiksaanwijzing. Voer zelf geen reparatie-, ombouw- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uit. Laat deze werkzaamheden alleen door een vakman uitvoeren. Werkplaatsen ontvangen op verzoek de benodigde documentatie voor onderhoud. De behuizing mag nooit worden geopend als de besturingseenheid is aangesloten op het elektriciteitsnet, omdat sommige onderdelen van het apparaat onder spanning staan. Dit apparaat mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant. Wij aanvaarden geen garantie of aansprakelijkheid voor onjuist

gebruik van de besturingseenheid.



Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld vanuit de stand-bymodus, start het met de laatst ingestelde waarden voor de snelheid en het zuigniveau. Zorg ervoor dat de frees die je vervangt niet met een te hoge snelheid start. Stel de gewenste snelheid in voordat u de frees vervangt.



Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die vertrouwd zijn met de werking en bediening van het apparaat. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.


Reiniging en desinfectie



Het apparaat is bedoeld voor gebruik met roterende instrumenten die niet in de huid of slijmvliezen dringen wanneer ze worden gebruikt zoals de bedoeling is, maar die toch onbedoeld letsel kunnen veroorzaken. De volgende reinigings- en desinfectieprocedures zijn ook voor dit doel ontworpen. De volgende stappen moeten na elke behandeling worden uitgevoerd:

- Verwijder eerst het roterende instrument (frees). Dit moet worden voorbereid volgens de instructies van de fabrikant.
- Verwijder weefselresten van het apparaat door af te nemen met een papieren doekje dat licht bevochtigd is met kraanwater. Veeg vervolgens alle oppervlakken van het apparaat af met desinfecterende doekjes (Mikrozid AF-doekjes van Schülke en Mayr). Het apparaat kan tijdens de levensduur zo vaak als nodig gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Leer het apparaat kennen

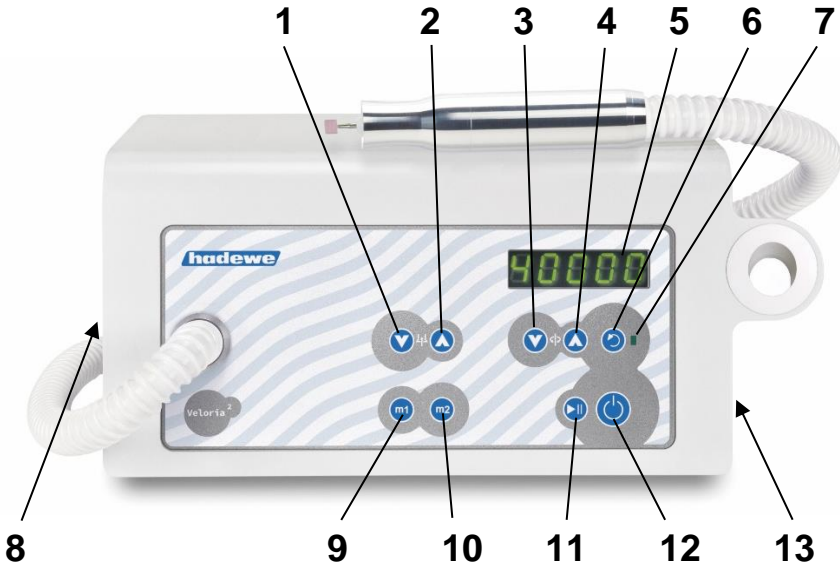

- 1 Verminder de zuigkracht
- 2 Afzuigcapaciteit verhogen
- 3 Snelheid verlagen
- 4 Snelheid verhogen
- 5 Weergave van snelheid/afzuigniveau
- 6 De draairichting wijzigen
- 7 Indicator licht op bij linksom draaien
- 8 Hoofdschakelaar
- 9 Geheugentoets m1 voor snelheid/zuigkracht
- 10 Geheugenknop m2 voor snelheid/zuigkracht
- 11 START/STOP-knop
- 12 Het apparaat in-/uitschakelen (stand-by)
- 13 Aansluitbus voor voetschakelaar

Voor gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Besteed vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Toepassingsgebied

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die een opleiding tot podoloog hebben afgerond. Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet de gebruiker zich vertrouwd maken met het apparaat aan de hand van deze instructies of moet hij geïnstrueerd zijn in het gebruik ervan.

Het apparaat mag alleen in gesloten ruimten worden gebruikt. Het kan worden gebruikt in een commerciële of huishoudelijke omgeving.

Het apparaat kan worden gebruikt voor installatie in kasten of als draagbaar apparaat voor koffers. Het is geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Voetverzorging (slijpen, frezen en polijsten),
- Manicure (slijpen, frezen en polijsten).



Het apparaat is bedoeld voor gebruik met roterende instrumenten die de huid of slijmvliezen niet binnendringen als ze worden gebruikt zoals de bedoeling is, maar die toch letsel kunnen veroorzaken als ze onbedoeld worden gebruikt.




Let op: Er moet worden afgezogen in het pedicuregebied.

Inbedrijfstelling


De installatie van de werkplek moet voldoen aan de geldende voorschriften. Plaats het apparaat zodanig dat de ventilatiesleuven niet afgedekt zijn en de afvoerlucht gemakkelijk kan ontsnappen. Om ervoor te zorgen dat de afvoerlucht ongehinderd kan ontsnappen, moet er een ruimte van 12 cm achter het apparaat zijn.

Plaats het apparaat zo dat de bedieningselementen goed bereikbaar zijn en het uitlooppunt van de slang niet meer dan 60 cm van de voet van de klant verwijderd is. De positioneringshoogte is 30 - 90 cm boven de vloer.

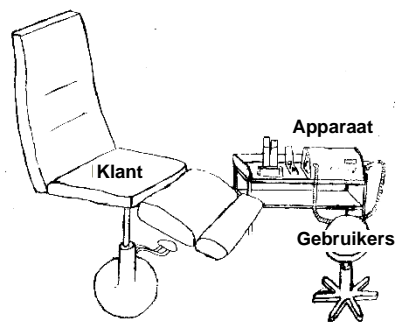


Afbeelding: Voorbeeld van de plaatsing van het voetverzorgingsapparaat in de behandelkamer

Voor gebruik

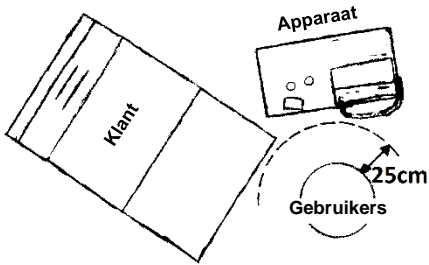

Afbeelding: Workplace vanuit vogelperspectief

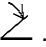Als u een voetschakelaar hebt, steekt u de stekker van de voetschakelaar in de aansluiting (13) aan de rechterkant van het apparaat met het symbol .

Controleer of de filterzak en het grofstofilter geplaatst zijn. Controleer of het gereedschap is vastgeklemd.

De hoofdschakelaar bevindt zich linksachter op het apparaat. Druk hierop om het apparaat in te schakelen.



Houd het handstuk in de hand. Als de slang het handstuk verdraait, kan

dit worden aangepast op de bedieningseenheid.



Druk op de knop (11) aan de voorkant van het apparaat om het handstuk en de afzuiging te starten.

Operationele stappen

De volgorde van de stappen wordt hieronder beschreven. De afzonderlijke stappen worden vervolgens in detail beschreven. Lees de volledige instructies voordat je aan de slag gaat.

Nadat je het instrument hebt vastgeklemd, druk je op de stand-byknop (12) om te beginnen met draaien. Gebruik de knoppen (3) en (4) om de gewenste snelheid te selecteren. De fabrikanten van de instrumenten geven vaak aanbevelingen voor de optimale snelheid. Zorg er echter in ieder geval voor dat de maximaal toegestane snelheid niet wordt overschreden.

Je kunt nu de knop (6) gebruiken om de draairichting te selecteren. Normaal gesproken werk je met de wijzers van de klok mee. De meeste freesinstrumenten (stalen instrumenten met een stalen snijkant) zijn ook geoptimaliseerd voor rechtsom draaien. Bij diamantslijpmachines of slijpmachines met aluminiumoxide heeft de draairichting geen invloed op de afnamesnelheid. Tegen de wijzers van de klok in draaien kan nuttig zijn als het ontstane freesstof in het gezichtsveld dwarrelt als het met de wijzers van de klok meedraait.

Schakel nu ook de zuigkracht in met knop (2). Met de knoppen (1) en (2) kun je de zuigkracht instellen.

zijn ingesteld, kun je beginnen met werken. Als je het werk wilt onderbreken, druk dan op de start/stopknop (11). De motor van het handstuk en de afzuiging worden dan uitgeschakeld. Je kunt nu het handstuk in de handstukhouder aan de rechterkant van het apparaat plaatsen. Als je helemaal wilt stoppen met werken, gebruik dan de stand-by knop (12). Het display zal dan ook uitschakelen. Als alternatief kan het apparaat ook op stand-by worden gezet door de knop op het voetpedaal in te drukken.

We raden aan het apparaat uit te schakelen met de hoofdschakelaar als het langere tijd niet wordt gebruikt. Dit bespaart elektriciteit. Als het apparaat niet wordt gebruikt, moet ook de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

Zodra de snelheid en de zuigkracht

Gebruik

Houding tijdens verwerking

De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van houdingen bij het werken aan verschillende delen van de voet. Zorg er altijd voor dat de voet goed vastzit en dat je zonder spanning kunt werken.



Gebruik



Gebruik

Zuig

Schakel de afzuiging in met de knop (2). De afzuigkracht kan in 5 stappen worden geregeld. Het geselecteerde afzuigniveau verschijnt op het display. Op niveau nul is de afzuiging uitgeschakeld.

Als de zuigmotor oververhit raakt, schakelt hij automatisch uit. Laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat het apparaat nakijken als de storing zich herhaaldelijk voordoet.

De filterzak vervangen




Tijdens de filtervervanging moet een ademhalingsmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.

Gebruik het afzuigstelsel alleen als er een filter is gemonteerd. Controleer het filter elke 10 bedrijfsuren. Vervang een vol filter onmiddellijk, maar niet later dan wanneer **FC** op het display verschijnt. Deze melding verschijnt na 50 bedrijfsuren in de afzuigmodus.

Druk de opening van het stoffilter (Art. 5179) lichtjes in met je vinger.



Open het deksel van de stofkamer en verwijder het oude filter. Houd het filter in het midden vast om het erop te schuiven, zoals op de afbeelding, om te voorkomen dat het knikt.

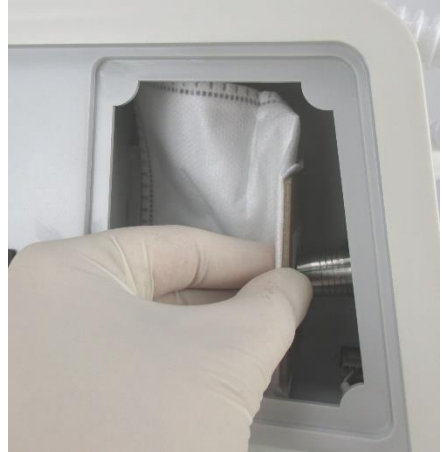


Het stoffilter (Art. 5179) moet worden gebruikt. Het grofstoffilter (Art. 5115) mag **NIET** worden gebruikt.

Nadat het filter is vervangen, moet de inschakelduur op nul worden gezet. Zet hiervoor het apparaat op stand-by met toets (12). Houd nu de toetsen (1) en (2) ingedrukt tot **FC** op het display verschijnt.

Gebruik

Het grofstoffilter vervangen

Het grofstoffilter (Art. 3752) moet om de 200 bedrijfsuren worden vervangen. Het oude filter wordt verwijderd en het nieuwe wordt in de houder geschoven.

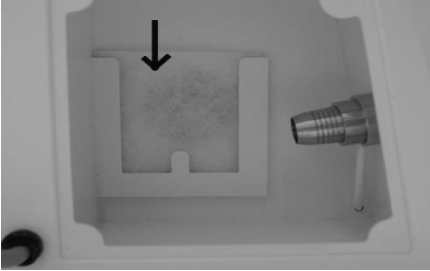

Het gereedschap opspannen

Frezen (of andere gereedschappen) mogen alleen worden geplaatst als de motor stilstaat. Het gereedschap wordt zo ver mogelijk in de houder geplaatst. Alle gereedschappen met een schachtdiameter van .35 mm kunnen worden gebruikt.



Vervang het gereedschap alleen als het handstuk is uitgeschakeld.

Snelheid instellen

Neem het handstuk (met gereedschap) in de hand of plaats het in de handstukhouder. Zet nu het apparaat aan met de knop (12). Je kunt nu de gewenste snelheid instellen met de knoppen (3) of (4). Selecteer de draairichting met de knop (6) .

Gebruik

Geheugentoetsen m1 en m2

Veelgebruikte snelheden/zuigvermogens kunnen worden opgeslagen. Hiervoor zijn 2 geheugenlocaties beschikbaar. Stel eerst de gewenste snelheid/zuigkracht in. Sla dit op door de knop m1 4 seconden ingedrukt te houden. Druk kort op de knop m1 om de opgeslagen snelheid/afzuigcapaciteit snel op te roepen. Met de knop m2 kunnen extra waarden worden opgeslagen.



Werk alleen met gereedschap dat is toegestaan voor de snelheden die zijn opgeslagen onder m1 en m2!

Voetschakelaar (Art. 0970)

Voetschakelaar in gebruik nemen

Gebruik alleen originele hadewoetschakelaars om schade te voorkomen. Steek de stekker van de voetschakelaar in de aansluiting (13) aan de rechterkant van het apparaat met het symbool .

Functie van de voetschakelaar


Door op de voetschakelaar te drukken wordt het apparaat in- of uitgeschakeld. Druk vervolgens kort om het handstuk en de zuigmotor te starten.

Onderhoud en verzorging

Het klemsysteem reinigen


Bij het induwen van de frees in het handstuk kan aanhangend stof in het klemsysteem terechtkomen. Dit kan ertoe leiden dat de frees niet diep genoeg kan worden ingebracht, waardoor een stevige grip niet meer gegarandeerd is. In veel gevallen leidt dit tot verhoogde slijtage. Het klemsysteem moet daarom elke 50 bedrijfsuren worden gereinigd.

Schroef hiervoor de metalen huls van het handstuk:

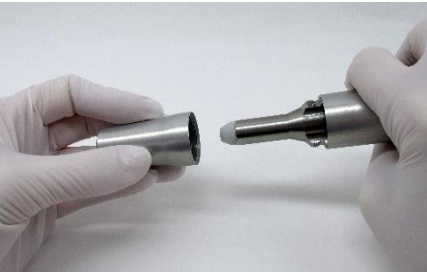

Reinig de binnenkant van de beschermkap en de huls met een droge borstel. Plaats nu voorzichtig de meegeleverde draaiboer in het handstuk.

Draai de boor met de klok mee terwijl je het witte plastic deel vasthoudt:

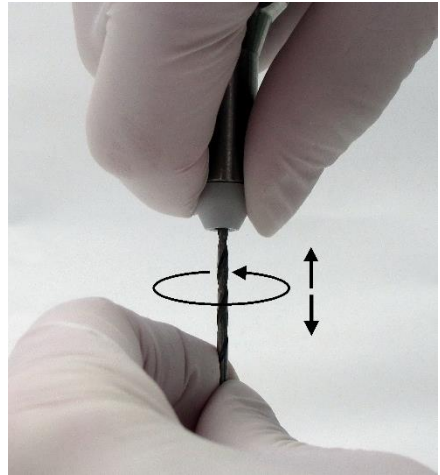


Oefen slechts lichte druk uit bij het inzetten. Het vastzittende stof komt los en wordt door de rotatie van de bur naar buiten getransporteerd. Houd het handstuk tijdens het proces naar beneden gericht, zodat het stof gemakkelijker uit het handstuk kan vallen. Schroef vervolgens de metalen huls weer vast.


Onderhoud en verzorging

Overzicht onderhoud


Wat?	Hoe vaak? Door wie?
Klemsysteem schoon	elke 50 uur door gebruiker
Filterzak veranderen	elke 50 uur (controle elke 10 uur) door gebruiker
Het grofstoffilter vervangen	elke 200 uur door gebruiker
Onderhoud door een gespecialiseerde werkplaats (slijtageonderdelen vervangen; behuizing controleren; schoonmaken, lekstroom)	Elke 250 bedrijfsuren, uiterlijk na één jaar


Hanteringsinstructies

 Plaats het gemotoriseerde handstuk nooit in een vloeistof en smeer het niet in met olie. Zorg ervoor dat er geen vocht in het gemotoriseerde handstuk kan binnendringen, zelfs niet tijdens het reinigen. Gebruik geen desinfectiespray.


 Klem nooit natte frezen vast. Hierdoor komt er vocht in het handstuk, wat tot schade kan leiden.


 De door hadewe gebruikte materialen sluiten roestvorming uit. In gevallen waarin roest wordt aangetroffen in het handstuk, tonen tests herhaaldelijk aan dat dit te wijten is aan vreemde roest afkomstig van gereedschap. Roest kan zelfs ontstaan op roestvrijstalen instrumenten van gerenommeerde fabrikanten, bijv. als ze verkeerd worden behandeld met chemische reinigings- en desinfectiemiddelen. Roest van buitenaf nestelt zich in het handstuk in de vorm van vliegroeft en leidt tot roestpitting. Laat daarom geen gereedschap in het handstuk geklemd zitten als je er niet mee werkt.


 Laat het handstuk niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Dit kan de kogel-lagers en de motor beschadigen.


 Werk alleen met gereedschap dat in perfecte staat verkeert. Werk niet met gereedschap,


- die gebogen zijn,
- die een onbalans hebben,
- waarvan de as versleten is
- of die verroest zijn.

 Werken met gereedschap dat niet in perfecte staat is, veroorzaakt een verhoogde trilling van het gemotoriseerde handstuk. Dit kan leiden tot beschadiging of vernieling van de lagers, het opspanapparaat en de motor.

 Werken met te hoge druk verhoogt de werkprestaties niet, omdat de motor wordt afgeremd. Een ander nadeel is de hogere belasting van de motor en de lagers.

 Werken op maximale snelheid kan vergelijkbare effecten hebben. Zorg ervoor dat de snelheidsinstelling die je gebruikt goedgekeurd is voor het gereedschap waarmee je werkt.

 Als je het apparaat wilt opsturen, verwijder dan eerst het stoffilter.

 Zuig alleen schuurspanen of stof op, maar nooit grotere deeltjes zoals wattenresten. Deze kunnen vast komen te zitten in het handstuk en leiden tot een verstopping.

Problemen oplossen

Het handstuk trilt, maakt veel lawaai en/of wordt heet aan de voorkant.

Gebruik van verbogen frees → Gebruik indien nodig een andere frees (de frees kan op verbogen worden gecontroleerd met freestestmeter 4990).

De maximaal toelaatbare snelheid van de frees is overschreden, met verhoogde trillingen als gevolg. → Neem de instructies van de fabrikant van de frees in acht.

Snijder is moeilijk in het handstuk te steken.

Gebruik van verbogen frees → Gebruik indien nodig een andere frees (de frees kan op verbogen worden gecontroleerd met freestestmeter 4990).

Spansysteem is vuil. → Reinig de spanthouder volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Het apparaat heeft geen enkele functie.

Controleer of de hoofdschakelaar aan de linkerkant is ingeschakeld.

De voetschakelaar wordt constant bediend of is defect. → Haal de stekker van de voetschakelaar uit het stopcontact om hem te testen.

Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat te resetten.

Het apparaat is luidruchtig op verschillende plaatsen.

Het volume van het apparaat varieert afhankelijk van de ondergrond. Als het apparaat recht voor muren staat, wordt het geluid sterker weerkaatst dan wanneer het verder van muren staat.

De motor van het handstuk stopt kort (ongeveer 1 seconde) bij het inschakelen.

Dit effect kan zich in zeldzame gevallen voordoen. Het effect is niet schadelijk voor het apparaat.

De afzuiging werkt niet.

Als de zuigmotor oververhit raakt, schakelt hij automatisch uit. Laat het apparaat afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat het apparaat nakijken als de storing zich herhaaldelijk voordoet.

Melding "FC" op het display

Filter vervangen (Filter vervangen)
→ Pagina 16

Foutmelding "E1" op het display

De snelheid van de handstukmotor wijkt te veel af van de ingestelde waarde.

Foutmelding "E2" in de display

Het toerental van de zuigmotor wijkt te veel af van de ingestelde waarde.

Foutmelding "E3" in de display

De stroom van de handstukmotor was lange tijd te hoog

Technische gegevens

0988 Veloria 2 Chroom

Gewicht: 2,7 kg
Afmetingen: B273xH142xD186 mm
Ingang: 230 V ~, 50 Hz, 200 W
Stroomverbruik: 1 A
Primaire zekering: F1, F2: 4A trage doorslag
Zekering Sec: Thermische zekering
Bescherminingsklasse I
Nauwkeurigheid snelheidsweergave: ±10 %

Handstuk:
Toepassingsgedeelte: Type B
Gewicht: 140 g
Diameter: 19 - 25 mm
Lengte: 118 mm
Snelheid: 6.000 - 40.000 tpm
Trillingen: <2,5 m/s²

Accessoires en reserveonderdelen

Art. Nr.	
5179	Fijnstoffilter
3752	Grof stoffilter
0970	Voetschakelaar
6158	Dubbele reinigingsborstel



Het stoffilter (Art. 5179) moet worden gebruikt. Het papierfilter (Art. 5115) mag NIET worden gebruikt.

Het klemsysteem is ontworpen voor roterende instrumenten met een asdiameter van 2,35 mm in overeenstemming met EN ISO 1797-1.

Bedrijfstijd

Het apparaat is ontworpen voor continu gebruik.

Omgevingsomstandigheden

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge, gesloten ruimtes.

Bediening:
Temp.: +10 °C tot +26 °C
Relatieve vochtigheid: 25% tot 75% (niet verkort)
Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag:
Temp: -5°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid: 10% tot 95% (niet verkort)
Luchtdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

Transport (tot 4 weken):
Temp: -5°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid: 10% tot 95% (niet verkort)
Luchtdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product Voetverzorgingsapparaat 0988 voldoet aan de volgende richtlijnen:

2014/30/EU EMC-richtlijn
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

hadewe GmbH - Grambartstraße 10
30165 Hannover

Veiligheidsgerelateerd Examen

Het apparaat moet jaarlijks worden onderworpen aan een veiligheidskeuring volgens DGUV voorschrift 3 (voorheen BGV A3).

Afvalverwijdering



Het apparaat en het filter kunnen besmettelijk materiaal bevatten, zoals schuurstofresten of weefselresten. Daarom moeten de hieronder beschreven instructies voor verwijdering dringend in acht worden genomen.

Verwijdering van apparaten
In overeenstemming met de wet op elektrische en elektronische apparatuur moeten oude apparaten die in Duitsland zijn gekocht rechtstreeks naar de fabrikant (hadewe) worden gestuurd.

De verwijdering door ons is gratis. De apparaten mogen niet worden ingeleverd bij de openbare afvalverwijderingsinstanties (WEEE-Reg.-No.-DE20392713, b2b-apparaat). Neem voor hadewe-apparaten die in het buitenland zijn gekocht contact op met de importeur.

Opmerking voor verwerkingsinstallaties voor de verwijdering van apparaten

Bij het demonteren van het apparaat moeten beschermende handschoenen van klasse 2 conform DIN EN 374-2 worden gedragen. Daarnaast moet een ademhalingsmasker conform EN 14683 type IIR of EN 149 FFP 2 worden gedragen.

Gooi de filterzak en het grofstoffilter weg

Filterzakken en grove stoffilters zijn laagvervuild afval. Deze moeten worden ingezameld in ondoorzichtige, vloeistofdichte, resistente plastic zakken en mogen niet worden

vermalen en weggegooid met het huishoudelijk afval.

Technische gegevens

Symbol



Let op! Gevaar!



Belangrijke opmerking!



Gebruiksaanwijzing
Let op!



Temperatuurbegrenzing
(verwijzing naar een bovenste
en onderste temperatuur-
grens)



Luchtdruk: toegestaan bereik



Vochtigheid: toegestaan be-
reik



Blijf droog!



Het apparaat in-/uitschakelen
(geen netvrijschakeling in
stand-by)



START/STOP-knop

m1, m2

Snelheid/zuigkracht oproepen
of opslaan



Draairichting wijzigen



Zuig



Rotatie



Wisselstroom



Gelijkstroom



Smeltbare verbinding



Voetschakelaar



Productiedatum,
Naam en adres
van de fabrikant



Product mag niet met het huis-
houdelijk afval worden wegge-
gooid



Beschermende aarding

hadewe

hadewe GmbH
Grambartstraße 10
30165 Hannover
Duitsland
info@hadewe.de
www.hadewe.de